

BM テスト™HbA1c コントロール

使用説明書

この使用説明書をよく読んでから使用してください

本品は、BM テスト™HbA1c を使用し、全血中のヘモグロビン A1c(HbA1c)を測定する際に、データ管理用として使用するものです。

〔使用 法〕

1. 本品 1 バイアルに精製水を正確に 1mL 加えて、約 10 分間室温で静置後、緩やかに転倒混和してください。調製後の安定性は、冷蔵で 10 日間です(凍結不可)。
2. 2 時間以上静置した場合は、良く攪拌してから使用してください。

〔取扱い上の注意事項〕*

1. 本品は、BM テスト™HbA1c 用のコントロールですので、本目的以外には使用しないでください。
2. 本品は、冷水で溶けにくい場合がありますので、20℃前後の精製水で溶解してください。
3. 本品は、HBs 抗原、HCV 抗体、HIV 抗体陰性を確認したヒト血液成分から調製しておりますが、使用の際には手袋などを着用し、検体と同様に感染の危険のあるものとして十分注意して取り扱ってください。
4. 廃棄にあたっては、廃棄物に関する規定に従い、医療廃棄物、又は産業廃棄物などとして処理してください。

〔包 装〕 1mL × 2 濃度 × 6

〔貯 法〕 2～10℃

〔使用期限〕 外装に表示してあります。

〔お問い合わせ先〕* 日本電子株式会社
医用機器事業部 ME コールセンター
〒190-0012 東京都立川市曙町 2-8-3 新鈴春ビル
電話番号:0120-134-770(受付時間 8:30～17:20)
FAX 番号:0120-134-765

製 造 販 売 元 日本電子株式会社
東京都武蔵村山市伊奈平二丁目 11 番地 1
TEL (042) 560-9120(代 表)