

BM テスト™HbA1c 前処理液

使用説明書

この使用説明書をよく読んでから使用してください

本品は、BM テスト™HbA1c を使用し、全血中のヘモグロビン A1c(HbA1c)を測定する際に、血球検体の前処理用として使用するものです。

〔使 用 法〕

1. 装置に設置した場合、少なくとも 4 週間安定です。
2. HbA1c の測定には遠心分離(800×g、5 分間)した血球検体を使用してください。
3. BM テスト™HbA1c 前処理液によって処理された検体を使用してください。

〔取扱い上の注意事項〕

1. 本品は、BM テスト™HbA1c 用の前処理液ですので、本目的以外には使用しないでください。
2. 本品は防腐剤として皮膚などを刺激することがある
プロクリン 300 (Sigma-Aldrich 社製) が含まれております。誤って目や口に入ったり、皮膚や衣類についたときは速やかに水で洗い流してください。
必要であれば医師の手当てを受けてください。
3. 本品及び処理した検体などを廃棄する場合には、廃棄物に関する規定に従い、医療廃棄物、又は産業廃棄物などとして処理してください。

〔貯 法〕 2～30℃

〔使用期限〕 外装に表示してあります。

〔お問い合わせ先〕* 日本電子株式会社
医用機器事業部 ME コールセンター
〒190-0012 東京都立川市曙町 2-8-3 新鈴春ビル
電話番号:0120-134-770(受付時間 8:30～17:20)
FAX 番号:0120-134-765

製 造 販 売 元 日本電子株式会社
東京都武蔵村山市伊奈平二丁目 11 番地 1
TEL (042) 560-9120(代表)